



## **DSC-33 Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD”**

### **Informacje techniczne:**

Średnica: 33cm

Kolor: niebieski, srebrny, czerwony

Numer katalogowy: DSC

Maksymalna obciążenia: 200kg

Materiał: PVC

### **ZASTOSOWANIE:**

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD” przeznaczona jest do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni grzbietu. Odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymusza siedzenie w prawidłowej pozycji, stymuluje mikro-ruchy krążków międzykręgowych. Szczególnie polecana dla osób, które dużo siedzą. Dzięki wyposażeniu w zaworek do regulacji ciśnienia, istnieje możliwość dopasowania właściwej twardości poduszki. Poduszka posiada dwufunkcyjne zastosowanie, dzięki wypustkom (kolcom na jednej z powierzchni) znajduje również zastosowane w masażu stóp, poprawiając ich ukrwienie oraz stymulując receptory.

### **W celu uniknięcia urazów:**

Zabrania się przekraczania maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta. Zabrania się ćwiczyć (ćwiczenia równoważne) w bliskiej odległości ostrych krawędzi, ostrych przedmiotów, otwartych źródeł ognia oraz innych ćwiczących. Zabrania się gwałtownego wskakiwania na poduszkę DYNAPAD. GROZI WYPADKIEM!!!

### **Przeciwwskazania:**

Stany pourazowe, niedoleczone złamania kończyn dolnych. Stany zapalne stawów, tkanek okołostawowych i obrzęki. Otwarte rany, otarcia naskórka, egzemy skórne. Niestabilność kręgosłupa jak również zaburzenia błędniaka. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

### **Właściwości produktu:**

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD” to produkt bezpieczny, materiał, z którego jest wykonana został przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

### **Uwagi:**

Przechowywać z dala od ognia, ostrych przedmiotów oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.

### **Sposób konserwacji:**

Po użyciu umyć wyrób wodą z łagodnym detergentem. Dokładnie osuszyć. Suszyć z daleka od sztucznych źródeł ciepła.

### **Incydenty:**

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

### **Utylizacja:**

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

### **Zaprzestanie używania wyrobu:**

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

SYMBOLE:



Wyrób  
medyczny

Zapoznaj  
się z  
instrukcją

Producent

Wyrób spełnia  
wymagania  
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /  
serii

Data  
produkcji  
m-c/rok

Nadaje  
się do  
recyklingu

Selektywna  
zbiórka  
odpadów



5 1907713 1380762

**ARMEDICAL Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

**Poduszka rehabilitacyjna - model DSC**

Wydanie 3 z dnia 28.04.2023r.

**PHTHALATE**



LOT

